

NORDLAB OULUN ALUELABORATORIOON LÄHETETTÄVIEN HUONEENLÄMPÖISTEN ALUEKULJETUSLAATIKOIDEN PAKKAUSTAPA:

Näytteiden aluekuljetuslaatikoiden pakkaustapa noudattaa YK-numeroon UN 3373 luokiteltavat aineet – säännösten mukaista pakkausohjeistusta.

- laatikoissa on iso muovipussi **jonka sisään** laitetaan imeytysliina
- **kaikki näytteet** laitetaan tämän muovipussin sisään imeytysliinan päälle omissa näytekuljetustelineissään/astioissaan/pusseissaan
- laatikoissa on laatikkokohtaiset lämpötilanseurantalaitteet joita ei saa siirtää toiseen laatikkoon
- Aluekuljetuslaatikkoon ei laiteta kylmäelementtejä, kuljetuslämpötila on **huoneenlämpö**, hälytysrajat 19 – 25 astetta

- Radan näytteet:
 - **BULK: näytteet muovipussissa**
 - fuugaamattomat 5 ml näyteputket, esim. P-ADVIA, P-BNP, P-PTH, S-PSA-SUH
 - Hba1C
 - tarrassa merkintä RATA, Horm, Sero, Huslab, Vita ym. ulkopuolinen laboratorio
 - Glukoosinäytteet, PAITSI ei glukoosirasituksia
 - Verikeskusnäytteet
 - päivystysnäytteet
 - Virtsanäytteistä U-Solut, U-Kemseul, U-Baktvi, U-LepnAg, UStpnAg
 - **tarrat on liimattu ohjeiden mukaan ilman ulkonevia kulmia tai ilmakuplia tarran alla**

 - **Radan telineeseen (Inpeco)**
 - Kaikki, myös kiireelliset fuugatut geeliputket ja muut erotellut näytteet, joissa merkintä RATA, Horm, Sero, Biok, Huslab, Vita ym. ulkopuolinen laboratorio.
 - Kiireellisten näytteiden sijoittelu radan telineeseen: ks. Aluekuljetusnäytteiden pakkausohje liite 3: Radan telineen täyttöohje.
 - P-LD, S-Li, P-APTT (eroteltuna)
 - **HUOM! EI kokoveriä!**

- **ks. ohje Aluekuljetusnäytteiden pakkausohje liite 1: Tutkimukset, jotka eivät mene automaattioradalle.**

- Muut näytteet laitetaan erilliseen telineeseen/laatikkoon. **Tähän erilliseen telineeseen laitetaan myös KAIKKI näytteet joissa on eri näytteenottopäivämäärä kuin tarrassa tai ruksimerkintä korkissa.**
- Jos kylmänäytteille ei ole omaa styroxlaukkua (esim. Oulun TK laboratoriot), kylmässä kuljetettavat näytteet laitetaan kylmään geelitaskuun tai pieneen styroxastiaan kylmäelementtien kanssa. Nämä laitetaan muiden näytteiden kanssa aluekuljetuslaatikossa olevaan isoon muovipussiin. HUOM! ei lämpötilasensorin viereen!
- yksittäisiä putkia (esim. virtsaputket) ei kääritä erikseen esim. selluun.
- **Aluekuljetuslaatikoihin laitettavia, pystyasennossa kuljetettavia fuugattuja geeliputkia ei tarvitse erotella.** Aluelaboratoriot: Poikkeuksena viikonloppuna ja arkipyhinä pakastettavat näytteet sekä Oulun alihankintana teettämät tutkimukset.
- Iso pussi suljetaan. **Muuta täyttömateriaalia aluekuljetuslaatikoihin ei saa laittaa.**
- Jos OML:n näytteille ei ole omaa kuljetuslaatikkoa (näille on oma ohjeistus pakkaamisesta), OML:n näytteet voi laittaa asiakaspalveluun tulevaan huoneenlämpölaatikkoon erillisessä pussissa johon laitetaan myös lähetteet. Huomioi kylmässä lähetettävät näytteet: esim. geelitasku.

HUONEENLÄMPÖISEN ALUEKULJETUSLAATIKON TARVIKKEET:

- iso pakkauspussi jonka sisään laitetaan kaikki materiaali
- imeytysliina
- radan telineitä
- erillinen teline ei-radalle meneville näytteille

Liitteet:

- 1: Luettelo tutkimuksista, jotka EIVÄT mene automaattioradalle
- 2: Yhteen liitettävät näyteputket
- 3: NordLab Oulun radan telineiden täyttöohje

Katso myös Intra: Ohjeet – Näytteenotonkäsikirja: Näyteputkien tarroitus- ja merkitsemisohjeet