


NORDLAB OULUN ALUELABORATORION RADAN TELINEIDEN TÄYTTÖOHJE:

Radan telineiden täyttölinja on ylhäältä alaspäin, ei sivusuuntaisesti tai hajalleen sijoitettuja putkia.

Telineen oikea täyttö, eli näyteputket asetellaan alkavaksi päästä, jossa ei ole musta käsikahva.

Rata alkaa ottamaan putkia telineen vasemmasta yläkulmasta.

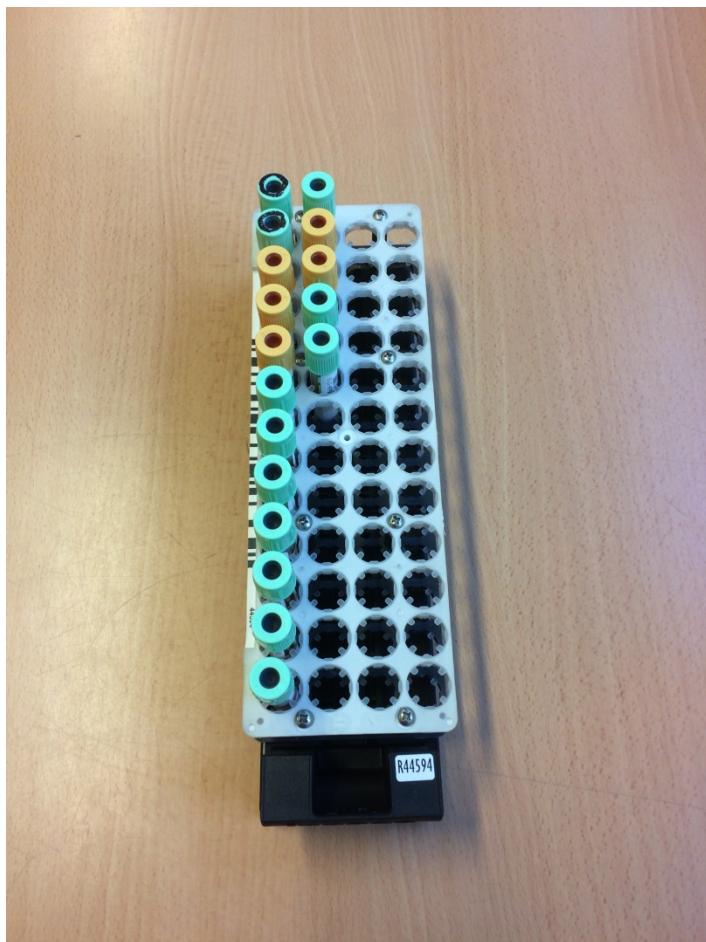


HUOM!

Fuugatut kiireelliset radalle menevät näytteet tulee laittaa radan telineeseen heti ensimmäiseksi.

Teline täytetty väärin, eli väärästä päästä eikä ”ylhäältä alaspäin”:



Teline täytetty väärin eli näytteet hajallaan sisältäen tyhjiä välejä:

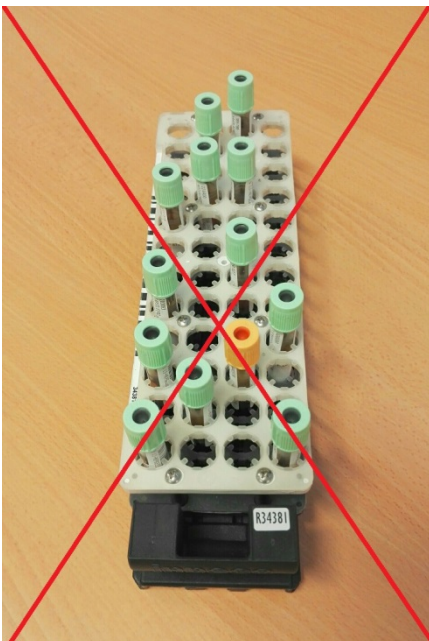

Telineeseen ei myöskään saa laittaa kuminauhalla yhteen liitettyjä putkia (ks. aluekuljetusnäytteiden pakkausohje liite 2)

