

Seerumin immunoglobuliini D:n (S –IgD) tekopaikka, menetelmä ja viitearvot muuttuvat

Tämä tiedote koskee kaikkia NordLabin asiakkaita.

Immunoglobuliini D, seerumista, S-IgD, nro 1670

Muutos tulee voimaan 2.2.2021

Muutoksen kuvaus Tutkimus siirretään toistaiseksi alihankintaan, tekopaikka HUSLAB. Alihankintamenetelmä on automaattinen immunoturbidimetrinen menetelmä (Binding Site), joka on tarkempi ja luotettavampi kuin nykyinen manuaalinen immunodiffuusiomenetelmä.

Menetelmämuutoksen takia vastausyksikkö ja viitearvot muuttuvat. Lisäksi otetaan käytössä myös lasten viiteväli. Yksittäisillä potilailla alihankintamenetelmässä tulostaso voi poiketa merkittävästi aikaisempaan menetelmään verrattuna. Seurantapotilaille suosittelemme alkuun uuden tulostason selvittämistä normaalia tiheämmillä seurantamäärityksillä.

Ikä	Vanha viiteväli	Uusi viiteväli
0-2 v	ei ollut	alle 140 mg/l
3-9 v	ei ollut	alle 210 mg/l
10-14 v	ei ollut	alle 300 mg/l
15-18 v	ei ollut	alle 150 mg/l
aikuiset/ yli 19 v	0 – 0,12 g/l	alle 132 mg/l

Lisäksi näytteen säilytys ja lähetystiedot muuttuvat:
1 ml hemolysoitumatonta ja eroteltua seerumia, lapset vähintään 0.5 ml.
Lähetys kylmässä (2-8 C), jos perillä viimeistään seuraavana päivänä,
muuten näyte on pakastettava (-20 C) ja lähetettävä pakastettuna.

Huom! Menetelmän herkkyys ei riitä IgD-puutoksen toteamiseen

<https://huslab.fi/ohjekirja/1670.html>

Tutkimuksen hinta Tutkimuksen uusi hinta: 49,5 €

Tiedusteluihin vastaavat Irina Nagy, ayl, NordLab Oulu, 0406356290, irina.nagy@nordlab.fi

Tuija Männistö, johtava lääkäri

Jakelu Kaikki NordLabin asiakkaat