

B -La -tutkimus siirtyy Raahen laboratoriosta Oulun laboratorioon analysoitavaksi

Tämä tiedote koskee NordLab Raahen laboratorion asiakkaita.

Kokoveren lasko**B- La (2203)**

Muutos tulee voimaan 01.04.2021

Muutoksen kuvaus Lasko-tutkimus keskitetään Raahen laboratoriosta Oulun laboratorioon.
Tulostaso ja viitearvot eivät muutu.

Näytteenottoon ja näytteen säilytykseen tulee muutoksia.

Näytteet otetaan violettikorkkiseen 5 ml:n EDTA-putkeen (samanlainen putki kuin PVK-näytteelle), mutta B -La-tutkimukselle tulee aina ottaa oma putki. Otettu näyte tulee laittaa näytteenoton jälkeen jääkaappiin tai jääkaappikylmän geelipakkauksen väliin.

Katso NordLabin näytteenotto-ohje:

https://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/verinayteputkikartta_asiakkaille.pdf

B- La-tutkimus ei ole päivystystutkimus.

Lisätietoja

http://oyslab.fi/cgi-bin/ohjekirja/tt_show.exe?assay=2203&terms=b-la

Tiedusteluihin vastaavat

Ylikemisti Eevastiina Marjoniemi, puh: 044-4394810,
eevastiina.marjoniemi@nordlab.fi

Tuija Männistö
NordLab, johtava lääkäri

Jakelu

NordLab Raahen asiakkaat