

## Ps-StrAAg-näytteiden käsittely COVID-19-epidemian aikana

3635 Ps-StrAAg *Streptococcus pyogenes* (A), antigeeni, nielueritteestä

Tämä tiedote koskee NordLabin laboratorioita sekä NordLabin valvomia toimipisteitä

### Muutos tulee voimaan

Heti

### Muutoksen kuvaus

Nielun streptokokki antigeenitesti (Ps-StrAAg) tehdään COVID-19-epidemian aikana seuraavia vaihtoehtoisia varotoimia noudattaen:

#### Mikäli tekopaikassa on käytettävissä biosuojakaappi tai vetokaappi:

- Käytettäessä QuikRead Go –laitteistoa, näytteen valmistelu ja kyvettiin siirto tehdään suojakaapin sisällä, suojakäsineet kädessä. Suojakäsineet vaihdetaan ja suljettu kyveti viedään analysaattorille.
- Muiden, kuin laitteella tehtävien testien osalta (kasetti- ja tikkutestit), tutkimus tehdään kokonaisuudessaan suojakaapin sisällä, suojakäsineet kädessä.

#### Mikäli tekopaikassa ei ole mahdollista käyttää suojakaappia:

- Kaikissa näytteen käsittelyyn ja analysointiin liittyvissä työvaiheissa käytetään erillistä suojatakia, hengityssuojainta ja suojakäsineitä.
- Näytteen käsittelyyn ja analysointiin varataan erillinen tila, jossa ei ole muuta toimintaa. Tai vaihtoehtoisesti tila, jossa muukin toiminta tapahtuu yllä mainittuihin suojavarusteisiin pukeutuneena.

### Tiedusteluihin vastaavat

Sairaalamikrobiologi Laura Savolainen, 040 635 6452,  
laura.savolainen@nordlab.fi

Erikoistuva lääkäri Jukka Torvikoski, 040 635 6502,  
jukka.torvikoski@nordlab.fi

### Allekirjoittaja

Tuija Männistö  
Johtava lääkäri

### Jakelu

Kaikki NordLabin laboratoriot sekä valvottavat toimipisteet