

11.6.2019

Laskon näytteenottoputki ja viitealueet muuttuvat

Tämä tiedote koskee NordLab Kokkolan aluelaboratorion asiakkaita.

Lasko**B –La, 2203**

**Muutos tulee
voimaan** 12.06.2019

**Muutoksen
kuvaus**

NordLab Kokkolan aluelaboratoriossa laskonäytteiden analysointi siirtyy uusille automatisoiduille laitteille.

Laitevaihdoksen yhteydessä näytteenottoputkeksi vaihtuu EDTA-putki, jossa näyte säilyy analysointikelpoisena pidempään.

Näyte lähetetään analysoitavaksi huoneenlämpöisenä, mikäli se on perillä 4 tunnin kuluessa näytteenotosta. Muutoin näyte lähetetään kylmässä, jossa näyte säilyy 24 tuntia. Näyte ei saa jäätä.

Näytteiden analysointi keskitetään Kokkolan aluelaboratoriossa terveysasemalaboratorioista K-PKS:n laboratorioon.

Näytteitä analysoidaan päivittäin päivävuoeroissa. Tutkimus ei ole päivystystutkimus.

Laskotutkimuksen mittaustapa säilyy entisellään. Tulostaso ei muutu.

Laitevaihdoksen yhteydessä viitevälejä tarkennetaan NordLabin yhtenäisen käytännön mukaiseksi:

	Vanha viiteväli	Uusi viiteväli	Yksikkö
Lapset alle 18 v	< 15	< 15	mm/h
Naiset alle 50 v	< 15	< 20	mm/h
Naiset yli 50 – 70 v	< 20	< 20	
Naiset yli 70 v		< 35	
Miehet alle 50 v	< 10	< 10	mm/h
Miehet yli 50 – 70 v	< 15	< 13	
Miehet yli 70 v		<30	

**Tiedusteluihin
vastaavat**

Jukka Saarimies, puh 0400 145518, jukka.saarimies@nordlab.fi

Jukka Saarimies
NordLab Kokkola/aluelaboratorion johtaja

Jakelu

Soite: lääkärit, osastosihteerit ja laboratorioyhdyshenkilöt
Työplus