

Mikrobiologisten näytteiden aluekuljetuslaatikoiden pakkausohje

Bakteriologian näytteet

- OML:ssa tehtävät bakteriologiset näytteet laitetaan omiin laatikkoihinsa, koska ne kuljetetaan suoraan OML:oon. Huoneenlämmössä kuljetettaville näytteille on isompi musta laatikko ja jääkaappilämpötilassa kuljetettavat näytteet pakataan pienempään siniseen laatikkoon, johon laitetaan jääkaappilämpötilaisia kylmäelementtejä. (Kts. erillinen tutkimuskohtainen lista jääkaappilämpötilassa kuljetettavista näytteistä.) Näytteet eivät saa olla suorassa kosketuksessa kylmäelementteihin. Kylmäkuljetuslaatikko voidaan pakata isomman huoneenlämpölaatikon sisälle. Kaikki näytteet pakataan erikseen omiin pusseihinsa, paitsi saman potilaan ulosteviljelyyn menevät purkki- ja tikkunäyte voidaan pakata samaan pussiin. Lähetteet pakataan yhteiseen muovitaskuun/pussiin.

Serologian ja autoimmunologian näytteet

- Serologian ja autoimmunologian näytteet laitetaan samoihin huoneenlämpö- tai kylmäkuljetuslaatikoihin kemian näytteiden kanssa. Kaikki pakastetut näytteet täytyy lähettää pakastettuna.

