

Kysymyksiin vastaa päivällä Oulun asiakaspalvelu 040 6356336 ja päivystysaikana 040 6356351.

KEMIAN RADALLE EI SAA LAITTA A SEURAAVIA TUTKIMUKSIA:

- B –PVK, B –La
- P - ALKO
- P –AntiFXa
- P - AT3
- P –EtOH
- P –Fimo-O
- P - Trombai
- LD-Is
- S –C-Pept
- S –Ca-ion
- S - GEN
- S –GT-CDT
- fS –Insu
- S -Insu
- S –MTX
- S - Paras
- S – Salis
- S – TR1Seul, fuug 2 h sisällä
- S – TSH-AbR
- S - Verialt
- S – Veriläh
- U – BaktEvi (Huom! kylmäkuljetus)
-
- Kaikki uS –näytteet (esim. uS –TSH, uS -Bil, uS –Insu, uS –T4v)
- Huumevirtsat
- Virtsanäytteet, jotka eivät ole BULK listassa, esim U-AlbKre, U-ProKre
- Vuorokausivirtsa keräykset

EIKÄ MYÖSKÄÄN SEURAAVIA:

- 10 ml verinäyteputket
- Genetiikan ja molekyylibiologian näytteet
- Projektinäytteet
- Avolla otetut näytteet (laita teippi korkin yli)
- Rasiukset
- Kylmänäytteet
- Erikoisfuugausnäytteet
- Punktionäytteet
- Kuminauhalla yhteenliitetyt näytteet