



Alzheimerin taudin diagnostiset merkkiaineet TUTKIMUSPYYNTÖ

Lomake voimassa 1.1.2020 alkaen

Henkilötiedot	Potilaan nimi	Henkilötunnus
	<input type="checkbox"/> CJD epäily	Näytteenottopäivämäärä
Pyydetty tutkimus	<p>Merkkiaineyhdistelmät:</p> <input type="checkbox"/> 4809 Li-FosTau, 4810 Li-Tau ja 4811 Li-BAm42 <input type="checkbox"/> 4809 Li-FosTau ja 4811 Li-BAm42 <input type="checkbox"/> 4810 Li-Tau ja 4811 Li-BAm42 <p>Yksittäiset merkkiaineet:</p> <input type="checkbox"/> 4811 Li-BAm42 <input type="checkbox"/> 4810 Li-Tau <input type="checkbox"/> 4809 Li-FosTau	
Tutkimuksen tilaaja	Tutkimuksen tilaaja	
	Vastausosoite	
	Laskutusosoite (jos eri kuin vastausosoite)	
Näytteen ottamista ja lähettämistä koskevat ohjeet	<ul style="list-style-type: none"> Näytteeksi otetaan selkäydinnestettä polypropyleeniputkeen (esimerkiksi Sarstedt PP putki). Laboratoriossa näyte tulee sentrifugoida mahdollisten solujen poistamiseksi ja siirtää kahteen á 0,5 ml lähetyspotkeen Sarstedt REF 72.730.005. Näyte 2 x 0,5ml on riittävä kolmen biomarkkerin analysointiin. Näyteputken päälle henkilön nimi, sotu, näytteenottopäivämäärä. Näyte säilytetään jääkaapissa ja lähetetään huoneenlämpöisenä vuorokauden (24h) sisällä näytteenotosta, vuorokautta pidempi säilytys ja lähetys pakastettuna -20°C. Ei postitusta PERJANTAISIN. Tutkimuspyyntölomakkeita voi tulostaa osoitteesta www.uef.fi/alzheimermarkkeritutkimukset Lähetyspotkia voi tilata veloituksetta osoitteesta alzheimermarkkeri@uef.fi 	
Vastausaika	<ul style="list-style-type: none"> Postitamme vastauksen viimeistään kuukauden kuluttua näytteen saapumisesta tutkimuslaboratorioon. 	
Näytteen postitusosoite	<p>Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Aivotutkimusyksikkö Biomarkkerilaboratorio PL 1627 (Yliopistonranta 1 B) 70211 Kuopio</p>	
Lisätietoja	<p>Ensisijainen puhelinnumero: Laboratorio 0400 648632 – alzheimermarkkeri@uef.fi Fax 017 163 539 Tutkija Sanna-Kaisa Herukka, 040 5486247, sanna-kaisa.herukka@uef.fi</p>	

1.1.2020/SKH