

Luokka	Laatuj. Työohjeet
Versio/pvm	1 / 14.12.2020
Laatijat	Aho-Laukkanen Elina; Savolainen Laura; Isohäätä Annika; Aaltonen Heikki
Vastuuhenkilö	Savolainen Laura
Hyväksyjä	Männistö Tuija
Tämä ohje koskee	Oulu; Kajaani
Paperijakelu	
Kansio	

## 1 Nenänielunäytteiden lähettäminen näytelinjalla/putkipostilla COVID-19-epidemian aikana

### Toiminta Kajaanissa

- Näytteen lähetävä yksikkö pakkaa viivakooditarralla merkätyn näyteputken salpapussiin jossa on imuliina. Toinen identtinen viivakooditarra liimataan salpapussin päälle.
- Salpapussi siirretään vielä toiseen salpapussiin, jossa imuliina.
- Tämän jälkeen näytteet siirretään putkipostikapseliin, joka suljetaan huolellisesti.
- Lähetys laboratorioon.
- Kapseli avataan laboratorioissa ja sisältö tyhjennetään tarjottimelle, joka vieään mikrobiologian laboratorioon.
- Päällimmäinen salpapussi voidaan avata huonetilassa.
- Viimeinen salpapussi, joka sisältää näyteputken, avataan aina biosuojakaapissa.
- Mikäli näyte on vuotanut kuljetuspussiin, näytettä ei tutkita.

### Toiminta Oulussa

Vain laboratorion henkilökunta voi lähettää kiireellisiä nenänielunäytteitä näytelinjalla.

- Näyteputki saapuu laboratorioon salpapussissa, jossa myös imuliina.
- Laboratorioissa irrotetaan salpapussista viivakoodillinen pyyntötarra,
- Salpapussi kääritään 4-6 selluvanulappuseen (koko 10 x15x cm), jonka jälkeen tämä kokonaisuus pakataan toiseen salpapussiin.
- Irrotettu pyyntötarra sekä näytteen kiireellisyydestä kertova huomiotarra liimataan päällimmäisen pussin päälle.
- Lähetys näytelinjalla.
- Päällimmäinen salpapussi voidaan avata huonetilassa.
- Viimeinen salpapussi, joka sisältää näyteputken, avataan aina biosuojakaapissa.
- Mikäli näyte on vuotanut kuljetuspussiin, näytettä ei tutkita.

### Muutokset tässä versiossa

Tämä on uusi ohje.