

KORKIN VÄRI Näytteenotto-järjestys	NÄYTEASTIA (putkityyppi)	SEKOITUS, SEISOTUS, SENTRIFUGOINTI ja muuta huomioitavaa
 3,2 % SITR (2 ml)	Hyytymisputki (esim. P-TT-INR, P-APTT) Lasten näytteenotto tai, jos näytettä on vaikea saada	sekoitus 3–4 kertaa Ei putkisekoittajaan Kolmion kärki osoittaa optiminäytemäärän ja kolmion kanta osoittaa maksimi- ja miniminäytemäärää (+/-10%) Ota hukkaputki, jos otat siipineulalla,
 3,2 % SITR (2,7 ml)	Hyytymisputki (esim. P-TT-INR, P-APTT)	sekoitus 3–4 kertaa Ei putkisekoittajaan Huomioi oikea täyttömäärä, harmaa viiva minimitäyttö Ota hukkaputki, jos otat siipineulalla,
 SEER (5 ml ja 9 ml)	Seerumi (esim. S-Klotsa)	sekoitus 5 – 6 kertaa seisotus 60 min
 SEER GEEL (3,5 ml)	Seerumi geeli (esim. S-Karba, S-Valpr, S -Ca-Ion, S - B12-vit, S-PSA, S-D-25, S-PRL)	sekoitus 5–6 kertaa seisotus 30 min ei kylmäseentrifugointia Huomioi, jos otat S-Ca-Ion siipineulalla, ota hukkaputki
 LI-HEP (4 ml)	Li-Hepariini (esim. P -TnT-VT)	sekoitus 8–10 kertaa
 LI-HEP GEEL (3 ml)	Li-Hepariini geeli (esim. P -TnT, P-CRP, P-Krea, P- Na, P- K, P - ALAT, P -Bil, P -LD, P-Alb, P -GT, fP -Kol, fP - Trigly, P -TSH, P-T4V, P- proBNP)	sekoitus 8–10 kertaa ei kylmäseentrifugointia
 EDTA (5/3 ml)	EDTA- näytteet (esim. B -PVK-T, B-LA , B-HbA1c)	sekoitus 8–10 kertaa B-LA otetaan pääsääntöisesti tähän putkeen HUOM! B-PVK-T ja B-LA näytteille omat putket! B-LA näyte siirrettävä jääkaappilämpötilaan 30min kuluessa näytteenotosta.
 FUUG EDTA (5/4 ml)	EDTA-näytteet (esim. E-ABORh, B -Xkoe, P-VRAb-O, P- BNP, fP-PTH, B-LA)	sekoitus 8–10 kertaa B-LA näyte voidaan ottaa tähän putkeen (ei Pohjois-Pohjanmaa) B-LA näyte siirrettävä jääkaappilämpötilaan 30min kuluessa näytteenotosta
 LA	LASKO	sekoitus 10 kertaa Tätä putkea käytetään vain Utsjoen alueella
 GLUK (2 ml ja 3 ml)	Glukoosi (FC Mix Tube), P -Gluk, fP-Gluk	sekoitus 10 kertaa ei seisotusta

TÄÄLLÄ ON KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖOHJEET

Hukkaputken käyttöön, näytteenottojärjestykseen, putkien tarroituksen liittyvät ohjeistukset löytyvät NordLabin nettisivuilta