

Luokka	Laatuj. työohjeet
Versio/pvm	1 / 18.1.2022
Laatijat	Hakula Miia; Kauranen Jari; Mäntynen Vesa
Vastuuhenkilö	Hakula Miia
Hyväksyjä	Savolainen Laura
Tämä ohje koskee	Pohjois-Pohjanmaa; Lappi; Kainuu; Länsi-Pohja; Keski-Pohjanmaa
Paperijakelu	
Kansio	

## hHPV-NhO -näytteenotto Rovers® Cervex-Brush -näytteenottoharjalla ThinPrep -astiaan



### Ennen näytteenottoa:

- Ota näytteenottovälineet esille ennen näytteenottoa. Avaa ThinPrep-näytteenottopurkin korkki kokonaan auki juuri ennen näytteenottoa.
- Huom! Liukasteita ei suositella käytettäväksi, sillä ne voivat häiritä tutkimusta. Erittäin kuiville limakalvoille voi käyttää NaCl-liuosta tai spekulan voi kastella lämpimällä vedellä.



### Näytteenotto

- Poista tarvittaessa hellävaraisesti ylimääräinen vuoto/lima kohdunsuulta
- Aseta näytteenottoharja kohdunkaulan kanavaan siten, että lyhyemmät harjakset ovat hyvin kontaktissa ektoserviksiin. Paina kevyesti, ja pyöritä näytteenottoharjaa myötäpäivään viisi täyttä kierrosta (A).

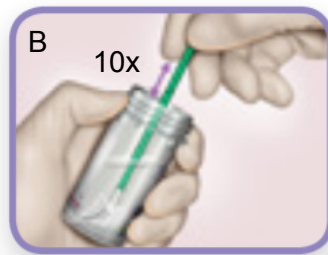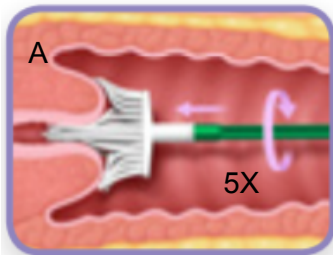

- Välittömästi näytteenoton jälkeen painele näytteenottoharjaa ThinPrep-purkin pohjaa vasten 10 kertaa siten, että harjakset sojottavat erilleen. Huljuttele harjaa loppuksi vielä voimakkaasti liuoksessa (B).
- Hävitä näytteenottoharja (älä jätä harjan päätä näytepurkkiin).
- Kiristä ThinPrep-purkin korkki tiukasti mustaan merkkiin asti (älä ylikiristä) (C).
- Tarkasta että pullossa on merkattuna potilastiedot tai viivakoodi.

### Näytteen lähetys ja säilyvyys

- Lähetä näyte laboratorioon viiveettä. Näytteet lähetetään huoneenlämpötilassa.
- Näyte säilyy huoneenlämmössä enintään 6 viikkoa.

### Huomioitavaa

- Näytteenottoa ei suositella kuukautisten aikaan, jos vuoto on runsasta
- Jos kohdunsuu on ummessa, näyte voidaan ottaa ensin tämän ohjeen mukaisesti näytteenottoharjalla, jonka jälkeen samaan näytteenottopurkkiin kerätään näyte papa-harjalla kiertämällä harjaa kohdunsuulla enintään ½-kierrosta. Harjaa kieritetään näytteenottopurkin liuoksessa 10 kertaa purkin seiniä pitkin, minkä jälkeen harjaa hyljytetään voimakkaasti. Harja heitetään pois.

### Muutokset tässä versiossa

- Tämä on uusi ohje.