


## Virtsanäytteiden siirto-ohjaimen käyttöohje



Kuva 1

### Kuva 1

- Asettakaa näytepurkki pöydälle.
- Älkää koskettako ohjaimen pilliosaa sormin!
- Laittakaa ohjaimen pilli nestepinnan alapuolelle.
- Painakaa näyteputki korkki edellä ohjaimen neulaa vasten pohjaan saakka. Varmistakaa, että virtsa suihkuu putkeen.
- Pitäkää ohjaimen pilli nestepinnan alapuolella niin kauan, kun nestepinta nousee putkessa.
- Poistakaa putki ohjaimesta.
- Mikäli näyteputkia on useampia, täyttäkää ne samalla tavalla.
- Virtsaa täytyy olla vähintään etiketin täyttöviivaan asti.

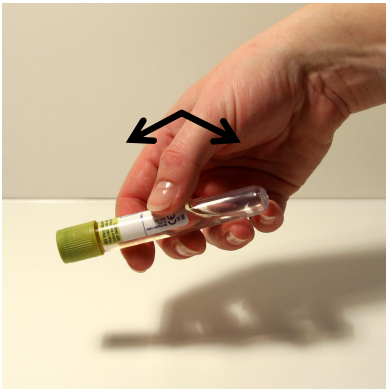

Kuva 2

### Kuva 2

- Kääntäkää näyteputkia 8-10 kertaa ylösalaisin niin, että ilmakupla kulkee putken päästä päähän.
- Säilöntäaine liukenee vähitellen.
- Säilöntäaineetonta putkea ei tarvitse käänellä.
- Putkia ei saa ravistella.

### Säilytys ja kuljetus:

- Säilyttäkää täytetyt säilöntäaineettomat putket +4°C:ssä
- Kuljettakaa kaikki putket huoneenlämmössä laboratorioon.

### Jätteiden hävitys:

- Toimittakaa ohjain riskijätteisiin ja hävittäkää näytepurkki sekajätteissä.