



BD:n turvaneulan käyttöohje


BD Vacutainer® Eclipse™ Signal™ verinäytteenottoneula ohjaimella

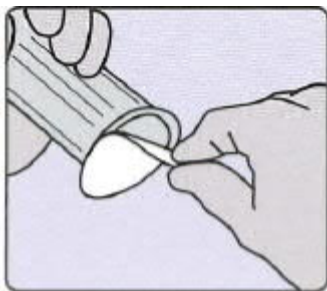


1. Laita suojäkäsineet käsiisi. Poista ohjaimen suojakalvo. Tuote heti käyttövalmis – osat ovat valmiiksi yhdistetty toisiinsa

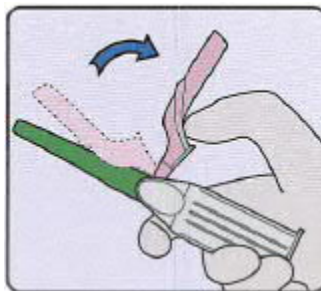


2a. Käännä neulan turvasuojus taaksepäin ohjainta vasten.
2b. Poista neulan värillinen suojus kiertämällä. Huomaa, että neulan kärjen aukko ja leikkauspinta ovat turvasuojuksen kanssa samansuuntaiset. Näin ollen neula on valmiiksi oikeassa asennossa verinäytteenottoa varten. ÄLÄ kierrä tai pyöritä turvasuojusta.

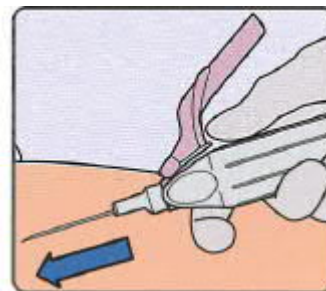


3. Suorita verinäytteenotto ohjeiden mukaan.

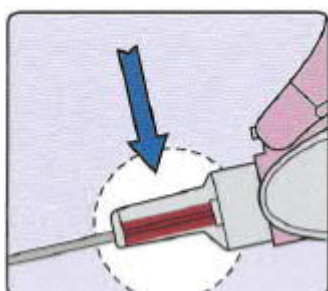

4. Neulan kammioon virtaava veri näyttää neulan oikean sijainnin laskimossa.

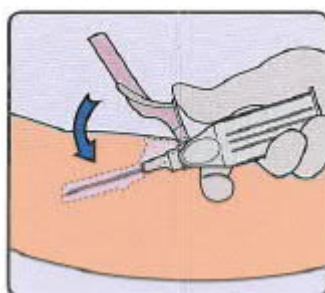

5. Poista näytteenoton jälkeen neula laskimosta. Paina peukalollasi turvasuojus neulan päälle. Suojus napsahtaa lukituessaan. ÄLÄ aktivoi turvasuojusta painamalla sitä kovaa alustaa vasten.

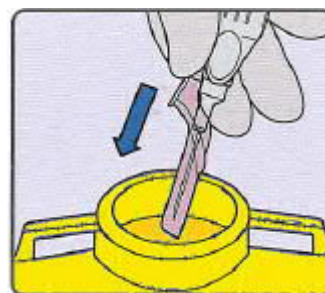

6. Laita käytetty turvaneula ja ohjain välittömästi pistävälle jätteelle tarkoitettuun riskijäteastiaan.