



BD:n turvasiipineulan käyttöohje


BD Vacutainer® Safety-Lok™ Siipineula

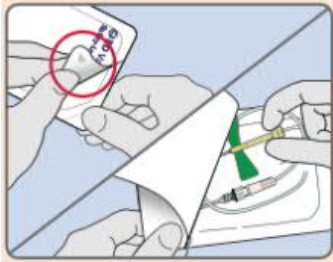


1a. Käytä suojäkäsineitä. Avaa tuotepakkaus nuolen osoittamasta kohdasta.
1b. Tartu siipineulaan peukalo-etusormi-otteella ja poista tuote pakkauksesta.
1c. Liitä siipineulaan kertakäyttöinen BD Vacutainer ohjain.

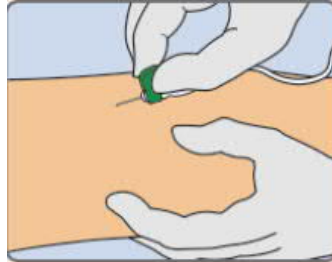

2. Pidä kiinni siipineulasta painamalla siipiä vastakkain etusormi-peukalo-otteella. Poista neulasuojus ja suorita laskimonäytteenotto ohjeen mukaan.

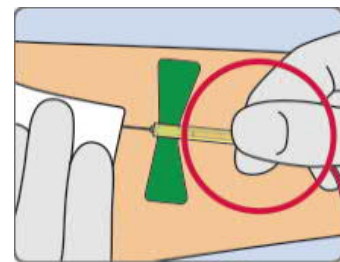


3. Pidä kiinni neulan otekohtasta, turvasuojuksen takaosasta peukalo-etusormi-otteella. Vedä neula pois suonesta. Paina pistokohtaa ohjeiden mukaisesti

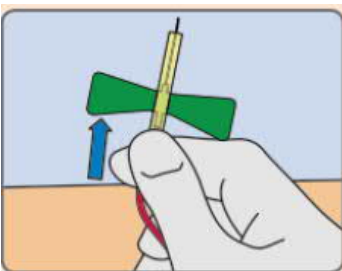

4. Paina letkua käden vapaana olevilla sormilla kämmettä vasten. Aktivoi peukalolla ja etusormella turvasuojus liuttamalla suojusta eteenpäin, kunnes suojus peittää neulan kärjen.

Turvasuojus on paikallaan, kun kuulet napsahduksen.

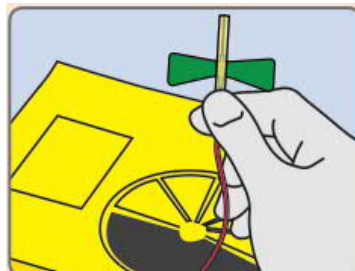

5. Hävitä siipineula asianmukaiseen riskijäteastiaan turvamekanismin aktivoinnin jälkeen. Hävitä sekä neula että kertakäyttöinen ohjain irrottamatta niitä toisistaan.