

Vacurette turvaneulan käyttöohje

Käyttöohjeet

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS



1 Avaa pakkaus

Avaa neulapakkaus nuolella merkitystä kohdasta vetämällä paperinen ja muovinen osa pakkauksesta täysin erilleen toisistaan.
Älä koskaan avaa pakkausta painamalla neulaa paperin tai muovin läpi, koska se vahingoittaa neulaa.



2 Käännä turvasuojus haluttuun asentoon

Neula on käyttövalmis, kun pakkaus on avattu. Ei ole tarvetta kiristää tai kääntää neulaa, joka on valmiiksi kiinnitetty ohjaimen, vaan päinvastoin esim. neulansuojuksen (ei turvasuojuksen) kääntäminen voi löysyttää neulaa, ja aiheuttaa jopa neulan irtoamisen näytteenoton aikana. Käännä turvasuojus haluamaasi asentoon ennen neulansuojuksen irrottamista.



3 Poista neulansuojus

Kun irrotat neulansuojuksen, ÄLÄ kierrä tai käännä suojusta, koska se voi kiertää neulaa irti ohjaimesta, mikä saattaa aiheuttaa neulan irtoamisen näytteenoton aikana. Vedä neulansuojus sen sijaan suoraan ulospäin.



4 Suorita laskimopunktio



5 Työnnä putki ohjaimen

Älä kierrä putkea ohjaimen sisällä ettei neula löysy.



6 Poista putki



7 Aktivoi turvamekanismi

Aktivoi turvamekanismi joko tukevaa ja liukumatonta alustaa vasten painamalla tai peukalollasi. Mikäli käytät peukaloasi, peukalon kärjen tulisi painua tukevasti turvasuojuksen syvennykseen.



8 Napsahdus osoittaa aktivoinnin tapahtuneen



9 Hävitä neula asianmukaisesti