


VACUETTE®-turvasiipineula - Käyttöohjeet




1. Poista neulansuojus




2. Suorita laskimopunktio

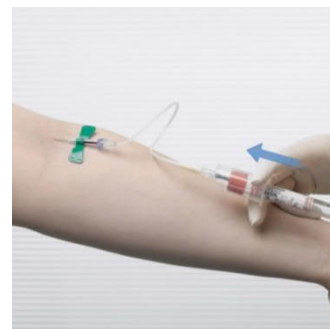


3. Työnnä putki ohjaimeen

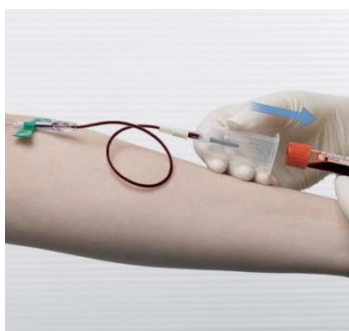


4. Poista viimeinen putki

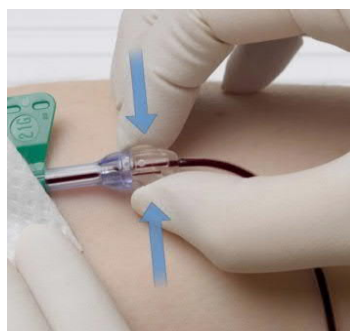

5. Aktivoi turvamekanismi painamalla läpinäkyvistä ja karhennetuista muovipainikkeista vaaleansinisen runko-osan alapuolelta, samalla vetäen kirkasta osaa itseesi päin

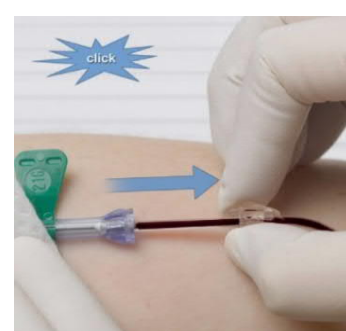

6. Napsahdus osoittaa aktivoinnin tapahtuneen

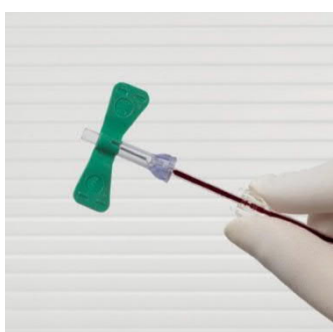

7. Käytetty turvasiipineula, jonka turvamekanismi on aktivoitu



8. Hävitä turvasiipineula asianmukaisesti