

VACUETTE®-turvasiipineula + veriviljelyohjain



1) Valmistele näytteenottokohta ja puhdista veriviljelypullon kuminen korkki työyksikkösi ohjeen mukaisesti.

2) Käytä pullon etikettiä halutessasi apunasi merkitsemällä siihen oikea näytemäärä esim. tussilla.

3) Suorita laskimopunktio VACUETTE®-turvasiipineulalla.

4) Paina veriviljelyohjaimen aerobipullon korkin päälle varmistaen, että neula lävistää korkin, ja pullo on näytteenottokohtaa alempana pystyasennossa. Kun haluttu näytemäärä on saavutettu, toista sama anaerobipullolla. Jatka tarvittaessa verinäytteenottoa vakuumiverinäyteputkiin.



5) Näytteenoton jälkeen vie puhtas ihonpuhdistuslappu toisella kädellä pistokohdan yläpuolelle ja paina neulan siivekettä ihoa vasten samalla kädelläsi. Aktivoi toisella kädellä turvamekanismi painamalla läpinäkyvistä ja karhennetuista muovipainikkeista sinisen runko-osan alapuolelta, samalla vetäen kirkasta osaa itseesi päin. Napsahdus osoittaa aktiivoinnin tapahtuneen.

6) Hävitä turvasiipineula asianmukaisesti työyksikkösi ohjeen mukaisesti